

CADEIRA MULTIUSO

transfer



Manual de Operação e Manutenção

CADEIRA MULTIUSO TRANSFER

1-CONHECENDO O EQUIPAMENTO

- a. CADEIRA MULTIUSO TRANSFER é a solução ideal para quem deseja dar conforto a pacientes com limitações de movimento e a seus cuidadores.
- b. Ela é extremamente útil nas transferências do paciente para a cama, o sofá, a cadeira de rodas, a mesa de refeições, o sanitário e o banheiro.
- c. Foi desenvolvida para ser operada por apenas um cuidador e somente em casos especiais será necessário mais de uma pessoa para ajudar o paciente.

2-ESTRUTURA E ACESSÓRIOS

A Cadeira Multiuso TRANSFER é composta de uma estrutura tubular com rodas fixas e giratórias e acessórios removíveis.

Ela foi especialmente projetada para ser leve, ágil, locomover-se no ambiente doméstico, ser segura para o paciente, confortável para o cuidador e ser facilmente transportada.

- a. ASSENTO ESTOFADO:
 - i. oferece conforto ao paciente nos deslocamentos.
- b. ASSENTO SANITÁRIO:
 - i. construído em chapa de aço e pintado com pintura eletrostática, é facilmente lavável.
 - ii. uma almofada de silicone que se compra em lojas especializadas em materiais hospitalares pode ser usada para aumentar o conforto.
- c. GUIDÃO REMOVÍVEL:
 - i. a remoção do guidão permite a colocação da Mesa de Apoio e o uso da cadeira em mesa de refeições.
- d. GUARDA-CORPO:
 - i. colocado às costas do paciente permite o deslocamento seguro
- e. RODAS E RODÍZIOS:
 - i. confeccionadas em elastômero macio, as rodas são silenciosas e não marcam o piso.
- f. MESA DE APOIO:
 - i. facilmente removível, pode ser um excelente acessório no trato com pacientes com limitações, servindo como mesa de refeições, apoio para terapias ou atividades recreativas.

- g. FREIO DE ESTACIONAMENTO
 - i. impede o deslizamento da cadeira quando da colocação ou retirada do paciente.
- h. HASTE PARA PENDURAR FRASCO DE SORO
 - i. é muito útil para pacientes em tratamento (opcional apenas para pedidos especiais sob encomenda).

3-MONTAGEM


- a. A Cadeira Multiuso TRANSFER é transportada desmontada na embalagem, mas seguindo-se instruções simples e usando-se as ferramentas adequadas é muito fácil de ser montada.
- b. Desembalando a Cadeira Multiuso TRANSFER
 - i. Abrir a caixa de papelão e retirar cada uma das peças de seu interior que estão embaladas separadamente.
 - ii. Desembalar cada uma e identificá-las: estrutura principal, guidão, assento estofado, suporte das rodas traseiras, guarda-corpo e freio (no Modelo Básico) e assento sanitário, mesa de apoio, haste de soro, se tiverem sido adquiridos estes acessórios.
- c. Montagem dos acessórios
 - i. Guidão
 - 1. Insira o guidão nos orifícios dos tubos da estrutura e gire os manípulos (borboletas) para mantê-lo devidamente preso.



- ii. Assentos estofado e sanitário:
 - 1. Puxe para fora as hastes deslizantes e apoie o assento fazendo-o encaixar corretamente sobre as estas hastes.
- iii. Guarda-corpo
 - 1. O Guarda-corpo tem duas posições: colocado virado para frente quando a cadeira não estiver em uso; e colocado virado para trás depois que o paciente se sentar.
 - 2. É só encaixá-lo corretamente nos tubos laterais de apoio.


iv. Apoio das rodas traseiras

1. Eles devem ser aparafusados nas hastes inferiores conforme a sequência de fotos a seguir.
2. Use a chave 13 mm fornecida com o equipamento e um alicate para fazer esta operação.

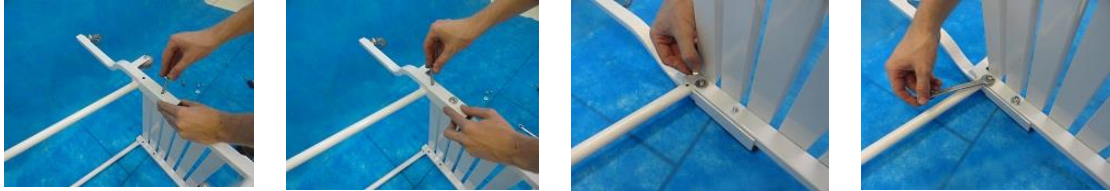

v. Freio de estacionamento

1. Ele deve ser encaixado no suporte e aparafusado na haste inferior frontal conforme a sequência de fotos a seguir.
2. Use um alicate e uma chave de fenda para esta operação.

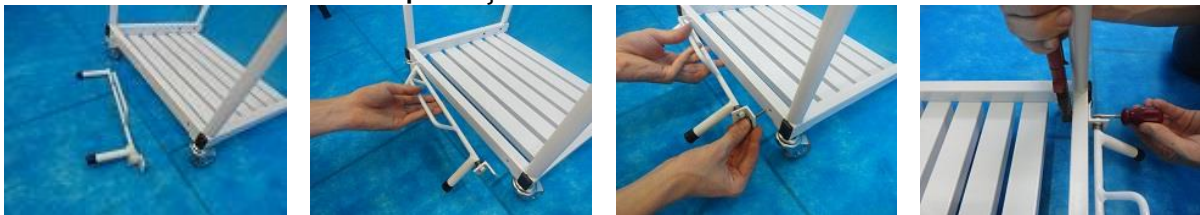

4-USO, MANUTENÇÃO E CUIDADOS

- a. O uso adequado da Cadeira Multiuso TRANSFER pode ser vista no vídeo promocional publicado no YouTube - <http://youtu.be/EIH4zOL5M5s> . Use-a apenas para estas operações recomendadas.
- b. A Cadeira Multiuso TRANSFER pode ser levada ao sanitário e ao chuveiro.
- c. **IMPORTANTE:** Após molhada deve ser deixada inclinada para escoamento da água do interior dos tubos e com as hastes retráteis puxadas para fora. Todas estas partes devem ser muito bem secadas com pano não deixando água acumulada nas soldas nem nas rodas.
- d. Cuidado especial deve ser dado à secagem das rodas e orifícios.
- e. Algumas gotas de óleo mineral da parte superior dos rodízios giratórios aumentará sua vida útil.
- f. Mantenha a sua Cadeira Multiuso TRANSFER sempre limpa. Use pano úmido com detergente neutro ou álcool.
- g. A capacidade de carga é de 80 kg para uso intenso e 100 kg para carga esporádica. Não a use acima deste limite.

- h. Mova a cadeira lentamente, especialmente no ambiente doméstico, para evitar choques com móveis e portas.

5-SEGURANÇA DO PACIENTE E DO CUIDADOR

- a. A Cadeira Multiuso TRANSFER é um instrumento de trabalho e segurança do profissional cuidador.
- b. Ela evita esforços desnecessários do cuidador e elimina operações perigosas nas transferências dos pacientes.
- c. Use sempre o freio de estacionamento quando for colocar ou tirar o paciente na cadeira.
- d. Nunca a use para outra finalidade.

6-DIMENSÕES E PESO

A Cadeira Multiuso TRANSFER foi desenvolvida também para ser prática e compacta.

- a. Dimensões da cadeira montada: 105 cm altura; 50 cm de largura; 81 cm de comprimento.
- b. Dimensões da embalagem: 66 cm de altura; 46 cm de largura; 51 cm de comprimento
- c. Peso: 13 kg (Modelo Básico)

INFORMAÇÕES, DÚVIDAS E SUGESTÕES:

Flutuar Empreendimentos Ltda
contato@ecooca.com.br

(27) 3033-0955 e (27) 99963-7286